

A gama de opções das barreiras convexas

As Barreiras convexas foram utilizadas para ajudar a fornecer um ajuste seguro e previsível para as bolsas. A escolha do produto é feita ao combinar a protuberância do estoma mais o contorno periostomia com a barreira apropriada. A curvatura da barreira de pele convexa para fora é desenhada para interagir diretamente com a pele periostomia.

Esta interação não depende somente da profundidade, rigidez e gradiente da barreira de pele convexa, mas também do formato e da rigidez da parede abdominal. Por exemplo, uma barreira convexa flexível consegue dobrar e se mover junto com o corpo; já a barreira convexa rígida não dobra, permanecendo sempre rígida. A escolha apropriada da barreira é realizada através da avaliação do paciente pelo enfermeiro e pelo conhecimento relacionado aos produtos de estomia disponíveis.

Tipo de Barreira	Possíveis Cenários Clínicos
 <p>Barreira de Pele Plana</p>	 <p>Barreira de Pele Plana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele periostomia plana • Protuberância adequada • Abertura do estoma centralizada
 <p>Barreira de Pele Plana com Anel Redondo ou Oval Convexo</p>	 <p>Convexidade Flexível</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estomia retraída • Pele periostomia irregular • Abertura do estoma descentralizada
 <p>Barreira com convexidade Macia Integrada</p>	 <p>Convexidade Macia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leve pressão para melhor ajuste • Estomia retraída • Lesão na pele periostomia
 <p>Barreira Convexa Integrada</p>	 <p>Convexidade Firme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vincos e dobras na pele periostomia • Abertura do estoma descentralizada • Estoma retraído abaixo do nível da pele
 <p>Barreira com Convexidade Integrada associada ao Anel Redondo ou Oval Convexo</p>	 <p>Convexidade Firme com maior profundidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estomia retraída ou abaixo do nível da pele • Contorno abdominal irregular • Abertura do estoma descentralizada

Referências:

- 1 J.C. Colwell, M.T. Goldberg, & J.E. Carmel (Eds). (2015). WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management. Chapter 10. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer
- 2 JHoeflok, J et al. Use of convexity in ostomy care: Results of an International Consensus Meeting. JWOCN, January/February 2017

Faça acompanhamentos de rotina com o seu profissional de saúde. Antes de usar algum produto ou acessório de estomia, leia as instruções de uso e as notas da embalagem. O logo da Hollister e "Pele saudável, Resultados Positivos." são marcas registradas da Hollister Incorporated. © 2017 Hollister Incorporated.

Hollister do Brasil Ltda.
 Av. Jabaquara, 2958
 7º andar - Conjunto 71 a 73
 São Paulo - SP - Tel.: (11) 5595-9650
 hollister.brazil@hollister.com.br
www.hollister.com.br

Para dúvidas, pedido de amostras ou perguntas clínicas detalhadas sobre nossos produtos entre em contato com o **Programa QualiVida** ligando no 0800-778-1000 ou então mandando um e-mail para qualivida@hollister.com.br